

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Respirátor FFP2 NR („NR“ znamená „nelze opakovaně použít“) bez výdechového ventilu

Jméno: DNA, Model: 2989 FM. Nesterilní. Bílý. Balení 25 ks.

Vyrobena dle normy: EN 149:2001 +A1:2009 FFP2NR, FFP2 PFE ≥95

FFP2 NR: Ochrana proti pevným částicím (prachu) a neprchavým kapalným částicím až do 10násobku mezní hodnoty. Žádná ochrana před enzymy, radioaktivními látkami nebo vzdušnými biologickými činiteli rizikové skupiny 3.

Omezení: Žádná ochrana proti výparům a plynům. Pouze masky FFP3 mohou snížit počet inhalovaných radioaktivních částic, ale radioaktivitě nelze zabránit. Omezení nošení (děti do 2 let).

Ochrana dýchacích cest je účinně zaručena pouze tehdy, je-li zvolena správná maska, správně nasazena a nasazena pokud je uživatel vystaven nebezpečí.

Certifikát: 2163-PPE-1858, dle nařízení (EU) 2016/425

Notifikovaná osoba: Universal Certification and Servillance Trade Ltd., Necip Fazil Bulvan Keyap Sitesi E2 Blok č.: 44/84 Yukan Dudullu, Ümraniye, Istanbul, Turecko

Distributor: AVAX, a.s., Daliborova 380/8, 102 00 Praha 10, Česká republika

Dovozce: BR Salon s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00, Praha 86, Česká republika

Výrobce: TULPAR SAĞNLIK ÜRÜNLERI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Konutkent Mahallsi 3035, Cadde No.: 74/B-28, Çankaya, Ankara, Turecko, webová stránka: www.dnamedical.com.tr, E-mail: info@dnamedical.com.tr

Certifikát EU přezkoušení typu 92-20-03 a EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny a návod k použití naleznete na www.avax.cz

Vyrobena: Leden 2021, Expirace: Leden 2024

Před použitím respirátoru FFP2 doporučujeme pečlivě přečíst návod k použití, který obsahuje pokyny pro bezpečné nasazování a sundávání a důležité upozornění a varování týkající se bezpečnosti práce, správné manipulace s kontaminovaným materiálem a další bezpečnostní požadavky. Dodržováním těchto doporučení zvýšíte účinnost respirátoru.

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNÉ NASAZENÍ RESPIRÁTORU:



1. Před použitím nově rozbaleného respirátoru si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce.
2. Uchopte respirátor tak, abyste sahali jen na jeho vnější stranu. Nesahejte dovnitř, kde budete mít ústa a nos, aby nedošlo ke kontaminaci. Vnější nosní část vložte do dlaně a respirátor si opatrně nasadte na obličej tak, aby byl zakrytý nos i ústa. Zajistěte respirátor popruhy za uši.
3. Jemně sevřete nosní klip a vytvarujte ho podle tvaru vašeho nosu a obličeje.
4. Tím si masku přizpůsobíte, aby vám dobře padla. Respirátor musí přiléhat podél tváří a pod bradou. Nedotýkejte se respirátoru v době jeho užívání, případně si ihned umyjte ruce.

CE
2163

BEZPEČNÉ SEJMUTÍ RESPIRÁTORU:

1. Odstranění z obličeje a jeho likvidace musí probíhat velmi opatrně.
Při sundávání se nedotýkejte rukama obličeje.
2. Ušní popruh vytáhněte zpoza jednoho a pak druhého ucha.
3. Respirátor držte stále jen za ušní popruhy.
4. Respirátor vložte do igelitového sáčku, ten uzavřete a poté jej ihned vyhoďte/zlikvidujte do kontejneru pro kontaminované materiály.
5. Po odstranění a likvidaci si důkladně umyjte a dezinfikujte ruce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ:

1. Je-li respirátor jakkoliv poškozen nebo kontaminován vydechovaním sekretů z úst a nosu, nebo jinými tělními tekutinami, je nutné ho vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní odpad.
2. Je-li respirátor extrémně zmačkaný, nepoužívejte ho. Ztrácí svou účinnost.
3. Respirátor používejte pouze na hladké a dobře oholené tváři. Vousy a vlasy nacházející se na dosedací ploše těsnící linie respirátoru mohou způsobit pravděpodobnou netěsnost a tím snižovat ochrannou účinnost respirátoru.
4. Nepoužívejte tento respirátor v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5 %.
5. Nepoužívejte tento respirátor ve špatně větraných prostorech.
6. Nepoužívejte tento respirátor při hašení požárů nebo pískování.
7. Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo čistícími prostředky respirátor nenávratně poškodí.
8. Respirátor se poškodí také auto lakováním nebo jinou formou zahřívání.
9. Opakované použití respirátoru je zakázáno.
10. Respirátor je určen na jedno použití. Nesmí se používat vícekrát.
11. Když respirátor odstraňujete z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části.
12. Jakmile bude respirátor vlhký, ihned ho vyměňte za nový.
13. Nepoužívejte respirátor ve výbušné atmosféře.
14. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho mimo kontaminované oblasti.
15. Respirátor nesmí být používán déle než jednu pracovní směnu nebo 8 hodin.
15. Při likvidaci respirátoru postupujte podle platných předpisů.

Skladujte respirátory uzavřené v originálním balení, mimo přímé sluneční záření nebo kontaminující látky, v dobře větraném prostoru, při teplotách od -20°C do +40°C a relativní vlhkosti < 80%.



Teplotní rozsah skladovacích podmínek



Maximální relativní vlhkost skladovacích podmínek



Více informací brožura výrobce



Rok / Měsíc konec doby skladování



Číslo šarže 892021FM12



Použití pouze na jednu směnu (8 hodin)



Nepoužívejte opakovaně