

Filtrační polomaska FFP2 NR bez výdechového ventilu

Model: YAFOX HKN001, nesterilní, bílý, balení 5ks, dle nařízení (EU) 2016/425

Vyroběn dle normy: EN 149:2001 +A1:2009 FFP2NR

Certifikát: 2163-PPE-1364/01, UNIIVERSAL CERTIFIKASYON VE GOZETIM HIZM.TIC.LTD.STI.

Keyap Ticaret Merkezi, Necip Fazil Bulvan, E2 Blok No:44/84, Yukan Dudullu Umraniye, Istanbul, Turecko

Distributor: AVAX, a.s., Daliborova 8, 102 00 Praha 10, ČR

Dovozce: BR Salon s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 86, ČR

Výrobce: ZAIDEK ELECTRONIC TECHNOLOGX (IAMEN) CO., Ltd., No. 285 Wengjiao Road, Haicang District Xiamen, Fujian, Čína, LOT 20201108

Certifikát EU přezkoušení typu 92-20-03 a EU prohlášení o shodě naleznete na www.avax.cz

Vyrobeno: 08. 11. 2020, Expirace: 08. 11. 2022



Před použitím respirátoru FFP2 doporučujeme pečlivě přečíst návod k použití, který obsahuje pokyny pro bezpečné nasazování a sundávání a důležité upozornění a varování týkající se bezpečnosti práce, správné manipulace s kontaminovaným materiálem a další bezpečnostní požadavky. Dodržováním těchto doporučení zvýšíte účinnost respirátoru.

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNÉ NASAZENÍ RESPIRÁTORU:

1. Před použitím nově rozbaleného respirátoru si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce.
2. Uchopte respirátor tak, abyste sahalí jen na jeho vnější stranu. Nesahejte dovnitř, kde budete mít ústa a nos, aby nedošlo ke kontaminaci. Vnější nosní část vložte do dlaně a respirátor si opatrně nasadte na obličej tak, aby byl zakrytý nos i ústa. Zajistěte respirátor popruhy za uši.
3. Jemně sevřete nosní klip a vytvarujte ho podle tvaru vašeho nosu a obličeje.
4. Tím si masku přizpůsobíte, aby vám dobře padla. Respirátor musí přiléhat podél tváří a pod bradou. Nedotýkejte se respirátoru v době jeho užívání, případně si ihned umyjte ruce.

BEZPEČNÉ SEJMUTÍ RESPIRÁTORU:

1. Odstranění z obličeje a jeho likvidace musí probíhat velmi opatrně. Při sundávání se nedotýkejte rukama obličeje.
2. Ušní popruh vytáhněte zpoza jednoho a pak druhého ucha.
3. Respirátor držte stále jen za ušní popruhy.
4. Respirátor vložte do igelitového sáčku, ten uzavřete a poté jej vyhoďte ihned zlikvidujte do kontejneru pro kontaminované materiály.
5. Po odstranění a likvidaci si důkladně umyjte a dezinfikujte ruce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ:

1. Je-li respirátor jakkoliv poškozen nebo kontaminován vydechováním sekretů z úst a nosu, nebo jinými tělními tekutinami, je nutně ho vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní odpad.
2. Je-li respirátor extrémně zmačkaný, nepoužívejte ho. Ztrácí svou účinnost.
3. Respirátor používejte pouze na hladké a dobře oholené tváři. Vousy a vlasy mohou zhoršovat těsnost a tím snižovat účinnost.
4. Nepoužívejte tento respirátor v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5 %.
5. Nepoužívejte tento respirátor ve špatně větraných prostorech.
6. Nepoužívejte tento respirátor při hašení požárů nebo pískování.
7. Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo čistícími prostředky respirátor nenávratně poškodí.
8. Respirátor se poškodí také auto lakováním nebo jinou formou zahřívání.
9. Opakované použití respirátoru je zakázáno.
10. Respirátor je určen na jedno použití. Nesmí se používat vícekrát.
11. Když respirátor odstraňujete z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části.
12. Jakmile bude respirátor vlhký, ihned ho vyměňte za nový.
13. Nepoužívejte respirátor ve výbušné atmosféře.
14. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho mimo kontaminované oblasti.
15. Respirátor nesmí být používán déle než jednu pracovní směnu.
15. Při likvidaci respirátoru postupujte podle platných předpisů.

Skladujte respirátory uzavřené v originálním balení, mimo přímé sluneční záření nebo kontaminující látky, při teplotách od -5°C do +50°C a relativní vlhkosti < 50%.